

DESINFECÇÃO DOS MATERIAIS DE ASSISTÊNCIA VENTILATÓRIA (COMO KIT DE TRAQUEIA DO VENTILADOR MECÂNICO) PODE-SE FAZER COM ÁCIDO PERACÉTICO?

escrito por Ana Miranda | 30 de maio de 2014

Sim, as traquéias, extensões, podem ser imersos no ácido peracético para desinfecção. (desinfecção de nível intermediário 10 min./ desinfecção de alto nível 30 min). O ácido peracético com pH mais próximo a neutralidade, é compatível com silicone; policarbonato, polietileno, aço inoxidável, alumínio bruto, poliuretano, PVC entre outros. É incompatível com cobre, latão, ferro, aço galvanizado e titânio.